

EXTENSION DE PARAMÈTRES  
ULTRA® Multifocale pour Astigmatés



UNE ADAPTATION  
*en un clin d'œil*

FLUIDITÉ  
STABILITÉ  
SIMPLICITÉ<sup>1,2,3</sup>



Lentille multifocale pour astigmatés fabriquée en série



Disponible  
**en stock**



Livrée  
**en 72h<sup>4</sup>**




Essais  
**gratuits**

Les nouveaux paramètres disponibles dès maintenant


Sphères

De -6,00D à +4,00D par 0,25D

Cylindres

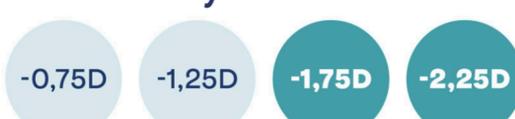

Axes

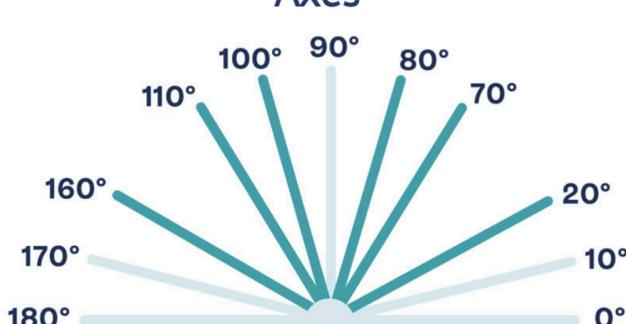

Additions

LOW : +0,75 à +1,50D

HIGH : +1,75 à +2,50D

Adaptation simple & rapide

Guide d'adaptation

1

Réfraction VL + addition & œil préféré de loin

2

Choix des lentilles



**RÉFRACTION VL = PUISSANCE VL\***



Addition lunettes  
+0,75 à +1,50D

Addition lunettes  
+1,75 à +2,50D

**LOW pour les 2 yeux**

**HIGH pour les 2 yeux**

Après 10 min, contrôle de la **stabilité des lentilles & évaluation de la vision\*\***

3

Améliorations si besoin

Lentilles  
initiales

Œil préféré VL  
**LOW**

Œil préféré VP  
**LOW**

Améliorer la VL

1  
OU  
2

<b>LOW</b> -0,25D/-0,50D	LOW
<b>ULTRA®</b> <b>POUR ASTIGMATÉS</b>	LOW

Améliorer la VP

1  
OU  
2

LOW	<b>LOW</b> +0,25D/+0,50D
LOW	<b>HIGH</b>

Lentilles  
initiales

Œil préféré VL  
**HIGH**

Œil préféré VP  
**HIGH**

Améliorer la VL

1  
OU  
2

<b>HIGH</b> -0,25D/-0,50D	HIGH
<b>LOW</b>	HIGH

Améliorer la VP

1

HIGH	<b>HIGH</b> +0,25D/+0,50D
------	------------------------------

\*Si nécessaire, tenir compte de la distance verre-œil.\*\*Auto-évaluation et AV VL et VP en binoculaire.

1. REF-MF-001 Scotton D, Perceptions of Bausch + Lomb PureVision® 2 for Presbyopia field observation evaluation. Rochester, NY. 2013. 2. REF-MF-002 ULTRA Comfort Experience™ for Presbyopia. 3. REF-MF-003 Schafer, Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilization study. March 2018. 4. Calculé en jours ouvrés. Délais généralement constaté.

© Bausch Lomb incorporated® TM sont des marques déposées de Bausch Lomb incorporated. Les lentilles de contact souples mensuelles ULTRA® multifocale pour Astigmatés sont des Dispositifs Médicaux de classe II a, fabriqués par Bausch Lomb Incorporated USA, qui portent le marquage CE 0050 dont l'évaluation de conformité a été établie par l'organisme habilité NSAI. Ces lentilles corrigent les astigmatismes. Pour recommander une utilisation correcte et sécuritaire de lentilles et leur confirmer la durée de port ainsi que la période de renouvellement, veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par les organismes publics d'assurance maladie, excepté dans les indications suivantes kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries non corrigibles par des lunettes, strabisme accommodatif. Bausch & Lomb France SAS à associé unique au capital de 163 650 150 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°240 275 650 dont le siège social est sis 416, rue Samuel Morse CS 79005 - 34967 Montpellier. Identification: 23-06-BAUSCH+LVC-PM-003