

BAUSCH + LOMB ULTRA®



MODE D'EMPLOI

Cette notice a pour but d'informer les porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles (samfilcon A) de Bausch + Lomb sur le port et l'entretien de leurs lentilles.

Elle s'applique à :

NOM DU PRODUIT	MATÉRIAU	TENEUR EN EAU	SOLUTION DE CONSERVATION
Bausch + Lomb ULTRA® (samfilcon A) Lentilles de contact teintées pour myopes et hypermétropes	Samfilcon A	46 %	Sérum physiologique boré avec poloxamine

Description et conditions de port

Ces lentilles de contact sont conçues pour un port journalier avec une période de renouvellement prescrite par l'ophtalmologiste. Avant d'être réutilisées, les lentilles doivent être nettoyées, rincées et désinfectées entre chaque retrait et pose.




Ces lentilles sont fournies stériles et sont conçues par le fabricant pour une réutilisation comme vous l'a prescrit votre ophtalmologiste. Elles ont été stérilisées à la vapeur.

NE LES UTILISEZ PAS si l'emballage est endommagé ou ouvert.

Instructions pour la pose et le retrait des lentilles

Avant de manipuler des lentilles, lavez-vous et séchez-vous toujours les mains en évitant d'utiliser des savons parfumés ou médicinaux. Placez la lentille dans la paume de la main. Veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens.

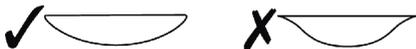

Vérifiez votre lentille avant de la placer sur l'oeil et ne l'utilisez pas si elle est rayée ou endommagée.

Pour retirer la lentille, veillez à ce que vos mains soient propres et sèches, faites glisser la lentille vers le blanc de l'oeil avec un doigt et retirez-la. Utilisez une goutte de solution hydratante si la lentille est difficile à retirer.

Instructions pour l'entretien de vos lentilles

- Il est essentiel pour la santé de vos yeux de nettoyer et de désinfecter vos lentilles entre chaque utilisation.
- N'utilisez que des produits d'entretien pour lentilles de contact souples en respectant les instructions du fabricant.
- Utilisez toujours des solutions d'entretien fraîches et des lentilles de contact non périmées.
- N'utilisez pas d'autres solutions, telles que l'eau du robinet ou en bouteille ou de la salive pour rincer, conserver ou réhumidifier les lentilles.
- Gardez toujours les lentilles complètement immergées dans la solution recommandée lorsqu'elles ne sont pas portées.
- Pensez à nettoyer votre étui à lentilles lorsque vous nettoyez vos lentilles.
- Jetez toujours vos lentilles à la fin de la période indiquée par votre ophtalmologiste.
- Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler les lentilles.
- Évitez tout contact de produits cosmétiques, lotions, savons, crèmes ou parfums avec les yeux ou les lentilles.
- N'utilisez jamais d'objets pointus ou vos ongles pour sortir les lentilles de leur étui ou les retirer de vos yeux.

Avertissements et précautions

Le non-respect des instructions de port et de nettoyage indiquées par votre ophtalmologiste peut accroître le risque d'infections oculaires graves.

Ne dormez pas avec vos lentilles de contact.

Ne portez pas de lentilles de contact si vous souffrez de :

- Allergie, inflammation, infection ou rougeur dans ou autour de l'oeil
- Problèmes de santé qui affectent les yeux, par exemple rhume ou grippe
- Toute maladie systémique affectant les yeux

Contactez votre ophtalmologiste avant de porter des lentilles de contact si :

- Sécheresse oculaire (film lacrymal insuffisant)
- Vous pratiquez des sports nautiques
- Vous vous trouvez dans des environnements particulièrement secs ou poussiéreux
- Vous prenez un médicament en application oculaire

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, retirez immédiatement vos lentilles :

- Picotements, brûlures, démangeaisons, irritation ou autre douleur oculaire
- Confort moindre par rapport à un port précédent
- Sécrétions inhabituelles ou larmolement excessif
- Rougeur oculaire
- Sécheresse oculaire importante ou persistante
- Baisse de l'acuité visuelle ou vision trouble
- Arcs-en-ciel ou halos autour des sources de lumière
- Sensibilité à la lumière

Si l'un de ces symptômes persiste après le retrait puis l'insertion d'une nouvelle lentille, retirez la lentille et consultez votre ophtalmologiste. Ces symptômes peuvent entraîner des troubles plus graves s'ils ne sont pas traités.

Guide de référence pour les symboles, étiquettes et emballages



Droit acquitté pour la gestion des déchets selon directive 94/62/CE



Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated,
106 London Road - Kingston-upon-Thames KT2 6TN, Royaume-Uni



Indique le marquage de conformité CE et le numéro de l'organisme certifié

Limite de température

Mai 2016 - ®/™ indiquent des marques commerciales déposées de Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Les autres noms de produits ou de marques sont des marques déposées par les propriétaires respectifs.